

**הוראות שימוש במיכל אישי 50 מ"ל לשטיפת עיניים**

**יעוד:** נשיאה אישית לעובדים החשופים לסיכון.

**תכולה:** 50 מ"ל דיפוטרין.

**אורך חיי מדף:** שנתיים.

**המלצות למיקום:** נרתיק הצמוד לחגורה.

**הוראות שימוש:**

1. הסר את מכסה הבקבוק ע"י סיבוב.
2. קרב את פיית המיכל אל העין.
3. שטוף בכל תכולת המיכל.
4. המשך שטיפה באריזת 500 מ"ל דיפוטרין.
5. פנה לגורם רפואי מוסמך!

**יעילות מירבית תוך 10 שניות מזמן הפגיעה!**

