

הוראות שימוש בשקית ניידת 500 מ"ל לשטיפת עיניים

יעוד : שטיפת עין לאחר פגיעת כימיקל מסוכן.

תכולה : 500 מ"ל דיפוטריין.

אורך חיי מדף : שנתיים.

המלצות למיקום : תחנות עבודה, מעבדות, רכבי הצלה, תרמילי חובשים.

הוראות שימוש :

1. הסר את הפקק האוטם את הצינורית היוצאת מהשקית.
2. חבר את הצינורית עם הפיה הכתומה לצינורית היוצאת מהשקית.
3. קרב את פיית השקית אל העין.
4. שטוף בכל תכולת השקית.
5. פנה לגורם רפואי מוסמך!

יעילות מירבית תוך דקה מזמן הפגיעה!

