

## הוראות שימוש בתרסיס מיני 200 מ"ל דיפוטרין

**יעוד:** תרסיס המיני משמש לטיפול בפגיעת שגודלה פנים וצוואר, אזור החזה וכו'.

**תכולה:** מיני- 200 מ"ל דיפוטרין.

**אורך חיי מדף:** שנתיים.

**המלצות למיקום:** תחנות עבודה קבועות, ערכות עזרה ראשונה לאנשי שטח.

### הוראות שימוש:

1. הסר את המכסה מהתרסיס
2. הפנה את פתח יציאת התרסיס לכיוון השטח הפגוע.
3. רסס את כל תכולת המיכל לכיסוי כל השטח הפגוע.
4. פנה לגורם רפואי מוסמך!

**יעילות מירבית תוך דקה מזמן הפגיעה!**

